


バイトフリーカラー

(BF1 BF2 BF2a BF3 BF4 BF5 BF6)

1004-03

2007年8月13日

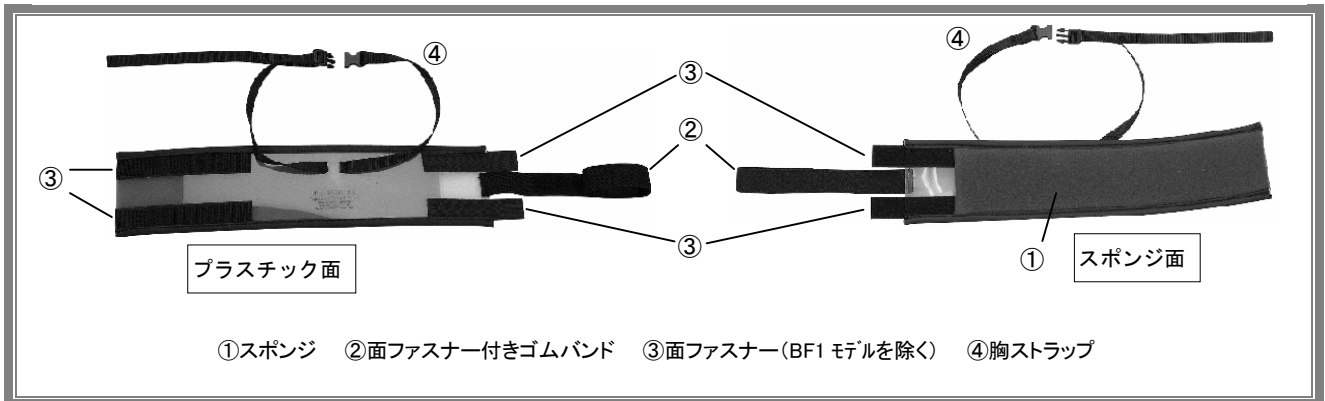

使用方法

- 1 胸ストラップ(④)を使用しない場合は、カラーから外します。
- 2 スポンジ(①)面を犬の首に当てて、頭部と肩の間にカラーがくるように巻き付けます。
- 3 ②の面ファスナー付きゴムバンドを、きつくならないように留めます。カラーと首の間に指が一本入る程度が目安です。
- 4 両側の面ファスナー(③)を留めます。
- 5 胸ストラップを使う場合は、以下の方法で装着します。

胸ストラップの装着方法

- 1 カラーがきつすぎないことを確認します。
- 2 ストラップの凸コネクタ部を犬の胸(前足の後部)に回し、凹コネクタ部に差し込みます。
- 3 ストラップの下に指が一本入る程度に長さを調節します。
- 4 ストラップのコネクタ部は、犬が横たわった時に邪魔にならないように、犬の背中にくるように回しておきます。

注 意

顔、目又は前足にキズ又はケガがある場合には、使用しないで下さい。

お手入れ方法

石けんで洗えます。漂白剤は使用しないで下さい。風通しの良い日陰に干して下さい。