

# N95 ポジティブフェイシャルロック


2040-02

2007年8月13日作成

## 【マスク装着方法】



1. マスク上部のノーズピース(鼻に当たる部分)と真ん中のチンピース(顎に当たる部分)をつかみます。

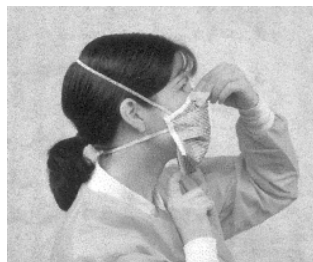

5. ノーズピースを鼻の形状に合わせてしっかりと抑え付け、そしてチンピースを顔に対してぴったり合うように人差し指でゆっくりと引っ張ります。



2. チンピース部分を引っ張り、マスクをいっばいに広げます。



6. マスクの下部をつまみ、顎の下までしっかりと覆い、ねじります。



3. 片手でチンピース部分をポケット状にしてつかみ、もう一方の手でゴムバンドを頭の後ろへまわします。1本は首の後ろへ、もう1本は後頭部へ掛けます。



7. マスクのフィット状態を確認します。マスク上部と下部に手を当てて隙間から空気が漏れるようであれば、ステップ5・6に戻り、再度装着をし直してください。



4. 鼻から口にかけて、しっかりとマスクに覆われていることを確認します。



8. 装着完了。

## 【注 意】

本品の使用により、感染の危険性は非常に減少しますが、完全になくなるわけではありません。

使用ごとに廃棄し、くり返し使用しないでください。

血液や体液が付着した場合は直ちに廃棄し、新しいマスクに替えてください。